

Instrucciones para usar el dispositivo de punción en mascotas

Características especiales

- **Diseño del interruptor de seguridad:** cuando es removida la tapa de ajuste de profundidad, el gatillo se bloqueará automáticamente para evitar que el usuario se pinche accidentalmente. La lanceta usada se puede expulsar presionando el émbolo con el pulgar. (Consulte el paso 9 a continuación).
- Cuando la tapa está puesta, el dispositivo de punción bloqueará la función de expulsión de lancetas para evitar que se retire la lanceta.
- El diseño de estructura estable y sofisticado evita la mínima vibración del dispositivo de punción. Pinchar la piel con la lanceta es más estable, prácticamente sin sensación de dolor. Reduce el nivel de estrés de los usuarios, permitiendo que las personas se recuperen más fácilmente de las frecuentes pruebas recomendada por su doctor.
- Un diseño elegante, delgado y ergonómico es cómodo y fácil de utilizar, incluso para los usuarios por primera vez.
- El indicador numérico en la tapa de ajuste de profundidad es fácil de leer y de ajustar la profundidad de penetración para su tipo de piel.

El diseño ergonómico permite una presión cómoda contra el dedo y reduce el estrés del uso. Simple y fácil de usar.

La gran ventana de visualización numérica muestra la profundidad de penetración. Fácil de leer y ajustar.

Botón de liberación largo, cómodo y fácil de operar.



Diseño de interruptor de seguridad patentado:


Cuando se quita la tapa, solo las funciones de carga o de expulsión de lancetas están disponibles. Cuando la tapa está puesta, las funciones de amartillado y disparo están disponibles y la función de eyección de lancetas está desactivada para evitar pinchazos accidentales.

Característica patentada:

Función de expulsión de una lanceta de mano.

Precauciones


- Tenga cuidado de no pincharse con la lanceta expuesta siempre que se remueve la tapa de ajuste de profundidad y la lanceta cargada está expuesta.
- El dispositivo de punción está diseñado para un usuario. Para evitar la exposición a contaminantes, no utilice el dispositivo de punción en varios usuarios.
- Por seguridad y para evitar la contaminación cruzada, deseche siempre las lancetas en un recipiente apropiado a prueba de perforaciones o de riesgo biológico.
- No desmonte el dispositivo de punción bajo ninguna circunstancia.
- El dispositivo de punción contiene piezas pequeñas que podrían provocar asfixia si es colocado en su boca. Almacene adecuadamente y manténgase alejado de los niños.
- Cuando la tapa está puesta y el dispositivo de punción está cargado, el interruptor de seguridad bloquea la tapa. Presione el botón de liberación antes de quitar la tapa.

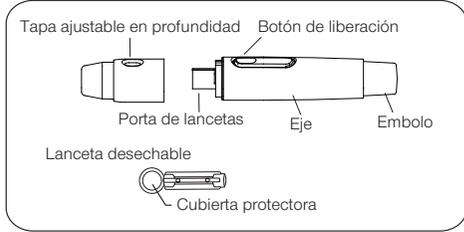


Instrucciones de uso

Lávese las manos con agua tibia y jabón; séquelas bien. Calentar el área ayudará a obtener una muestra de sangre. Siga los pasos enumerados a continuación.


A. Preparación y uso del dispositivo de punción.

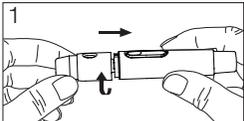


1. Sostenga la tapa de ajuste de profundidad con una mano y sujete el cubo con la otra mano, gire la tapa de ajuste de profundidad.

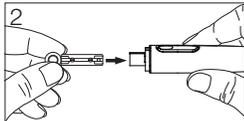

2. Inserte firmemente una nueva lanceta desechable en el soporte de la lanceta

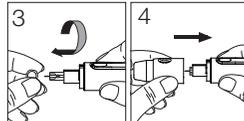


3. Gire el protector de la punta de la lanceta de la lanceta desechable y dejar a un lado.

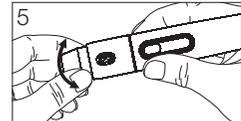


4. Colocar la tapa de ajuste de profundidad.


5. Seleccione una profundidad de penetración girando la parte superior de la tapa de ajuste de profundidad hasta que el número correcto aparece en el ventana. La configuración se basa en tipo de piel. "1-2" son para piel suave o fina piel. "3-4" son para pieles normales. "5-6" son para pieles gruesas o callosa.

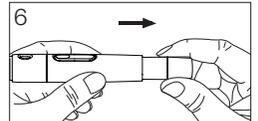

6. Sostenga el cubo con una mano y tire del émbolo con la otra mano. Al liberar el émbolo este volverá a su posición original. El dispositivo está ahora preparado para el disparo.

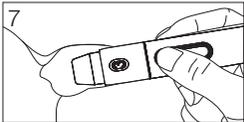

7. Coloque el dispositivo de punción contra el interior de la oreja.
NOTA: Los gatos tienen un sitio de prueba, mientras que los perros tienen seis.

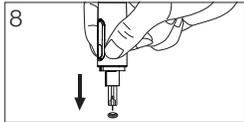


8. Retire la tapa de ajuste de profundidad. Inserte la punta de la lanceta en la funda protectora sin tocar la lanceta usada.



9. Sostenga el cuerpo del dispositivo de punción con una mano, empuje el émbolo con el pulgar para expulsar la lanceta usada.



10. Deseche la lanceta usada en un contenedor adecuado a prueba de pinchazos o de riesgo biológico

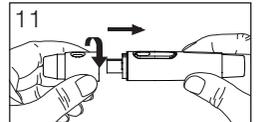

11. Colocar nuevamente la tapa de ajuste de profundidad después de terminar la prueba.

B. Sitios de prueba opcionales solo para perros. Para los gatos, use solo el "punto suave" en la oreja.

(Se requiere la tapa transparente opcional).

- (1) Tome la tapa transparente y siga del paso 1 al paso 4.
- (2) Masajea la zona de punción durante unos segundos.
- (3) Inmediatamente después de masajear el área de la punción, presione y sostenga el dispositivo de punción contra la piel de su mascota.
- (4) Presione el botón de liberación.
- (5) Mantenga el dispositivo de punción contra el sitio de la prueba durante 2-3 segundos para permitir que se produzca la gota de sangre.
- (6) Siga los pasos 8-10 anteriores para desechar la lanceta desechable usada.

Limpieza

Utilice un paño húmedo limpio para limpiar el exterior del dispositivo de punción.

Para evitar oxidar el resorte interno, no sumerja el dispositivo en agua.

Warranty

Advocate® garantiza que su dispositivo de punción está libre de defectos durante (1) año a partir de la fecha de compra. Cualquier defecto en los materiales o la mano de obra de este dispositivo de punción será reparado o reemplazado sin cargo. Esta garantía no se aplica al mal uso, alteración o abuso físico de este producto de ninguna manera. Esta garantía le proporciona derechos legales según la ley.

Servicio al Cliente

Para obtener más información, comuníquese con nosotros al 1-866-373-2824 (los 7 días de la semana, las 24 horas del día). Lea todas las instrucciones para asegurarse de que está realizando todos los pasos correctamente.

Distribuido por: Diabetic Supply of Suncoast, Inc., PO Box 2102, Vega Alta, PR 00692

Número gratuito: 1-866-373-2824 | www.advocatemetres.com | (7 días a la semana, 24 horas al día)

